

Máscara Social Reutilizável

TORVES, LDA
LARGO DO CALVÁRIO Nº 10
6200-734 TORTOSENDO



Nível 3
Modelo B 4013/1

Composição da máscara

Uma camada - Interlock 100% algodão ref.4013/1 (com selo COVID-19 aprovado para máscara nível 3)

Cumpra os requisitos mínimos de respirabilidade e capacidade de filtração comprovado com Declaração de Conformidade através do "Relatório CITEVE nº 11093/2020" e baseado no "Relatório Citeve nº 5328/2020-1"

Garante suavidade para evitar a irritação da pele

Clipe nasal de alumínio revestido, para ajuste ao nariz

Marca Comercial ou código/Ref.ª: Modelo B 4013/1

Nº lote / Mês / Ano de Fabrico: Ver embalagem



Instruções de utilização


Esta máscara pretende servir como uma máscara barreira para complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>

A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem:


- A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso;
- A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com Orientação da DGS (nº 019/2020 de 03/04/2020):
 - a. Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
 - b. Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
 - c. Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
 - d. Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
 - e. Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - f. Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada
 - g. A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos elásticos;
 - h. A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
 - i. Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.
- A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização;
- A máscara deve ser guardada em ambiente seco e resguardadas de potencial contaminação;
- Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra;
- No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto "conservação e limpeza" e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.

Modo de utilização da máscara

Pictograma exemplificativo de colocação de máscara

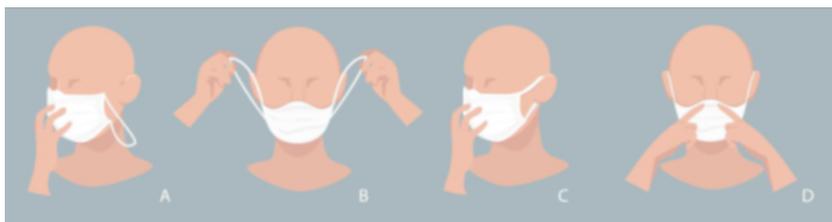

Pictograma exemplificativo da retirada de máscara

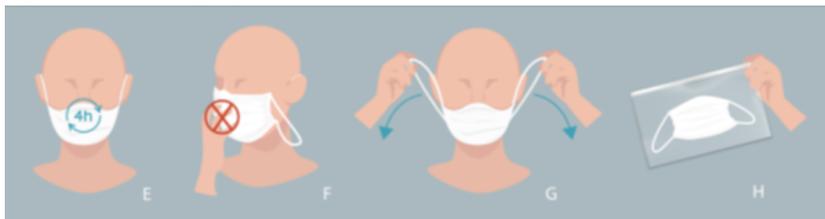


Identificação de direito e avesso

Na face interna da máscara estão aplicados os elásticos



COM AJUSTE DE NARIZ

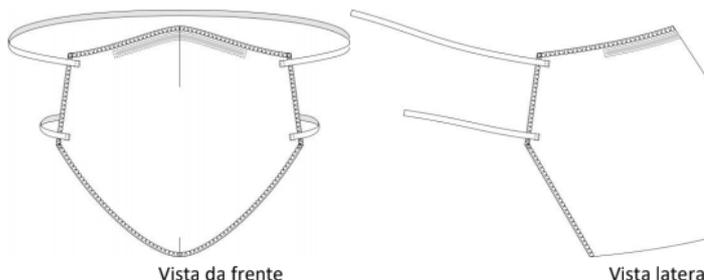


Identificação da vida útil

Número máximo de ciclos de lavagem 25

Condições de conservação e limpeza



As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização. Não permite a limpeza a seco. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.

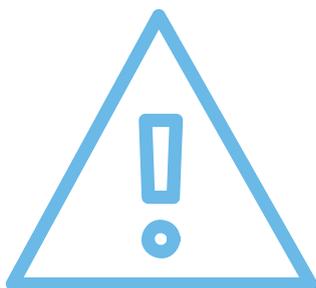

- Estas máscaras não são para utilização por profissionais de saúde no exercício das suas funções, nem são um dispositivo médico e não cumprem o regulamento das máscaras cirúrgicas (Regulamento UE/2017/745) nem dos EPI (Regulamento UE/2016/425);
- A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada. A máscara molhada / húmida diminui a proteção da máscara;
- A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem;
- Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- Ao fim da utilização diária recomendada ou sempre que regressar a casa a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada;